

semplice

Bastano poche operazioni per ottenere uno smalto brillante, con solamente due applicazioni all'anno.

sicuro

Il metodo è indolore e senza rischi, può essere messo in atto da chiunque, i materiali e le apparecchiature sono made in Italy garantiti e certificati.

veloce

Oltre a lavaggio e risciacquo dei denti l'operazione non richiede più dei 20 minuti necessari per il trattamento.



edro21.com



sorridi, sei su



SMILE

podospecial Italy s.r.l.

51013 Chiesina Uzzanese (Pistoia) Italia - Via delle Corti, 65/69
Tel. +39.0572.445415 - +39.0572.445399
www.podospecial.it info@podospecial.it



SMILE

Trattamento estetico del sorriso



SMILE

Trattamento estetico per donare lucentezza e splendore ai denti.

In pochi semplici passaggi garantirete ai vostri Clienti un sorriso smagliante, un trattamento semplice e veloce che vi permette di completare l'offerta dei vostri servizi.



Prima



Dopo

Il prodotto viene fornito in kit comprensivo di: 1 lampada con batterie ricaricabili e 12 mascherine monouso pre-riempite con gel sbiancante.



DENTI BIANCHI IN 4 MOSSE

Lavarsi i denti e asciugarli nella parte anteriore con del tessuto o del cotone.



1

Applicare la mascherina sulle arcate dentarie.




2

Indossare occhiali di protezione.



3

Avvicinare il più possibile la lampada alla bocca e illuminarla per massimo 20 minuti.

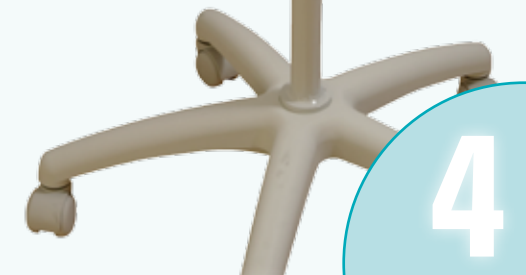

4